

ADHESE® UNIVERSAL VON IVOCCLAR VIVADENT




Mit Adhese® Universal präsentiert Ivoclar Vivadent ein neues lighthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv für direkte und indirekte Versorgungen. Es kann im Total-Etch-Verfahren, als selbstätzendes Adhäsiv oder nach einer selektiven Schmelzätzung verwendet werden. Dank der Stiftdarreichungsform VivaPen® erfolgt die Applikation direkt und schnell im Patientenmund. Das universell einsetzbare Adhäsiv Adhese® Universal schafft einen guten Verbund zu unterschiedlichen Restaurationsmaterialien. Es eignet sich für direkte und indirekte Versorgungen.

KOMPATIBEL MIT ALLEN ÄTZTECHNIKEN

In Adhese® Universal sind hydrophile und hydrophobe Eigenschaften vereint. Es ist tolerant gegenüber Feuchtigkeit und dringt gut in offene Dentintubuli ein. Da es gemäßigt sauer ist, eignet es sich für alle Ätztechniken (Self-Etch, selektive Schmelzätzung oder Total-Etch) und sorgt für eine optimale Haftung zwischen Zahn und Restauration.


WIE ZUFRIEDEN SIND SIE INSGESAMT MIT DEM ADHÄSIV??

46 % äußerst zufrieden
 42 % sehr zufrieden
 11 % zufrieden
 1 % weniger zufrieden
 0 % überhaupt nicht zufrieden

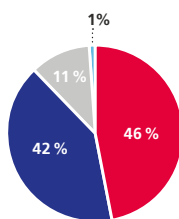

WIE ZUFRIEDEN SIND SIE INSGESAMT MIT DER VIVAPEN® LIEFERFORM?

54 % äußerst zufrieden
 34 % sehr zufrieden
 8 % zufrieden
 3 % weniger zufrieden
 1 % überhaupt nicht zufrieden

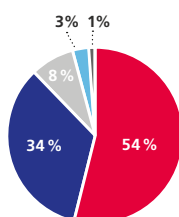

EFFIZIENTE DOSIERUNG

Mithilfe des einfachen Klick-Mechanismus der Stiftdarreichungsform VivaPen® kann die benötigte Menge Adhäsiv exakt dosiert werden. Ein Vordosieren in Portionierschälchen entfällt, was den Materialverlust deutlich verringert. Der VivaPen® ermöglicht mit 2ml Füllmenge circa 190 Einzelzahn-Anwendungen. Das sind fast dreimal mehr Anwendungen pro Milliliter, im Vergleich zu konventionellen Flaschen. Adhese® Universal ist nicht nur in der Stiftdarreichungsform VivaPen®, sondern auch in konventionellen Flaschen erhältlich.

ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE


Adhese® Universal ist technik- und fehlertolerant. Es bildet eine homogene und stabile Filmschicht, die unempfindlich gegenüber unterschiedlichen Anwendungstechniken ist. Gleichzeitig sorgt es mit nur einer Adhäsivschicht für anhaltend hohe Haftwerte auf Schmelz und Dentin, unabhängig vom verwendeten Ätzprotokoll. Zudem kann Adhese® Universal – durch den Einsatz eines acetonfreien, hydrophilen Lösungsmittels – Dentin und Schmelz optimal benetzen. Es dringt in die Dentintubuli ein und versiegelt sie. Microleakage und postoperative Sensibilitäten werden dadurch reduziert.

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- Universelle Anwendung
 - für direkte und indirekte Restaurationen und alle Ätztechniken
- Überzeugende Ergebnisse
 - hohe Haftkraft auf Dentin und Schmelz
- Effiziente Dosierung
 - ca. 190 Einzelzahn-Anwendungen pro VivaPen®

WELCHE EIGENSCHAFTEN VON ADHESE® UNIVERSAL FANDEN SIE BESONDERS GUT (TOP 3)?

58 % einfache Handhabung
 7 % gute Haftung
 4 % zeitsparend

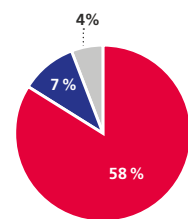

WÜRDEN SIE DAS ADHÄSIV, DAS SIE DERZEIT IN IHRER PRAXIS ANWENDEN, DURCH ADHESE UNIVERSAL ERSETZEN?

60 % ja
 31 % nein
 8 % vielleicht
 1 % keine Angabe

