

BOND FORCE II VON TOKUYAMA




HERAUSRAGENDE HAFTKRAFT BEI NOCH EINFACHERER UND SCHNELLERER ANWENDUNG

Bond Force II ist ein selbststärzendes Ein-Komponenten-Adhäsiv, das Fluorid zum Schutz vor Sekundärkaries freisetzt. Jegliche Vorbehandlungen, wie beispielsweise das Anmischen, entfallen vollständig. Trotz einfachster Anwendung – Bond Force II benötigt nur eine Applikation – überzeugt es mit herausragenden adhäsiven Eigenschaften. Nach der Applikation sind lediglich eine kurze Einwirkphase von 10 Sekunden, eine Trocknungsphase von 5 Sekunden sowie eine Lichthärtung von 10 Sekunden erforderlich. Dies macht Bond Force II zu einem der schnellsten Bondingsysteme. Obendrein ist Bond Force II äußerst lagerstabil, sodass keine Aufbewahrung im Kühlschrank notwendig ist. Bond Force II bietet für jede Art der Anwendung die passende Applikationsform. Sei es die klassische Flasche, den sparsamen Pen oder aber die innovativen Einmalbehälter Unit Dose. Bond Force II wird in Deutschland von der Kaniedenta GmbH & Co.KG (Herford) vertrieben.


HABEN SIE BEREITS DAS ALTE BOND FORCE BENUTZT?

62 % nein
38 % ja

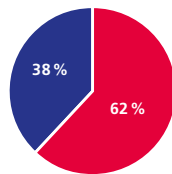


WIE ZUFRIEDEN WAREN SIE GENERELL MIT DER ANWENDUNG DES NEUEN BOND FORCE II?

62 % sehr zufrieden
36 % zufrieden
2 % keine Angabe
0 % weniger zufrieden
0 % unzufrieden

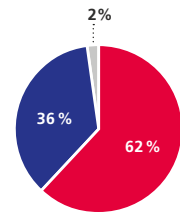


WELCHE EIGENSCHAFT DES BOND FORCE II HAT SIE AM MEISTEN ÜBERZEUGT?

28 % schnelle Anwendung
26 % keine Kühlschranklagerung
19 % hohe Haftkraft
15 % Flouridabgabe
12 % Technikunempfindlichkeit

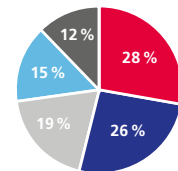

WIE BEURTEILEN SIE DIE AUSBILDUNG DER BONDING-SCHICHT?


59 % gut
41 % sehr gut
0 % befriedigend
0 % ausreichend
0 % mangelhaft

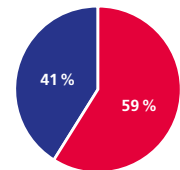

GIBT ES MATERIALEIGENSCHAFTEN, DIE SIE NOCH BEIM BOND FORCE II VERMISSEN UND WENN JA WELCHE?

92 % keine
8 % wenn ja, welche

- stärker eingefärbt und etwas visköser
- kürzere Einwirkzeit
- keine Dry Spots

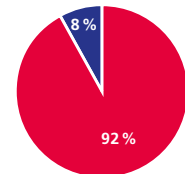

LIEBE LESERINNEN UND LESER DES DENTAL BAROMETER,

zuerst einmal natürlich vielen Dank, dass Sie sich wieder so zahlreich bereit erklärt haben, an diesem Produkttest teilzunehmen. Die Resonanz auf unser neues Bonding BOND FORCE II war überwältigend. Mehr als 60 Prozent der Tester hatte noch gar keine Erfahrungen mit dem „alten“ BOND FORCE, sondern stellten sich völlig unvoreingenommen und aufgeschlossen einem für sie neuen Produkt. Vor diesem Hintergrund erfreut das Endergebnis umso mehr, denn bis auf eine fehlende Angabe äußerten sich alle Tester zufrieden, die große Mehrheit sogar sehr zufrieden, ob der guten Materialeigenschaften. Hier gefiel den Testern insbesondere die schnelle Anwendung, was

auch für uns eine Bestätigung unserer Arbeit ist, denn unsere Bestrebung war es und ist es, Ihnen die tägliche Arbeit mit einfachen, schnell zu handhabenden, aber natürlich auch zuverlässigen Produkten zu erleichtern. Ein sicherer Haftverbund – der von allen Testern mit mindestens gut, mehrheitlich sogar sehr gut bewertet wurde – ist selbstverständlich unabdingbar bei einer Restauration, aber es muss nicht kompliziert und aufwändig sein, wie das BOND FORCE II eindrucksvoll in diesem unabhängigen Test nachgewiesen hat, sodass das Material kaum noch Wünsche offenlässt. Typisch Tokuyama eben: Dental High Tech from Japan.



Markus Leson,
Sales Manager, Tokuyama
Dental Deutschland GmbH