

ESD-ENTNAHMESYSTEM VON LEGE ARTIS



ENDODONTIE IST SEHR AUFWENDIG – DA IST JEDE ARBEITSERLEICHTERUNG WILLKOMMEN!

Mit dem ESD-Entnahmesystem von lege artis wird das Aufziehen von Spritzen kinderleicht. Tropfen und Kleckern war gestern; heute haben wir ESD! ESD steht für einfach, sicher, direkt oder auch „easy safe direct“. Das ESD-System muss nicht umständlich selbst montiert werden – wobei zur Vermeidung einer Kontamination äußerst sorgfältig vorgegangen werden sollte – nein, ESD ist in jeder Flasche der Endo-Lösungen von lege artis bereits montiert, also in allen Flaschengrößen der Produkte HISTOLITH NaOCl 5% und HISTOLITH NaOCl 3%, CALCINASE EDTA-Lösung und CHX-Endo 2% und das ganz ohne zusätzliche Kosten.

Egal ob Sie Luer-Lock-Spritzen oder Luer-Spritzen verwenden, mit diesem System sparen Sie wertvolle Zeit. Für besondere Fälle, wenn die Lösungen mal nicht in Spritzen aufgezogen werden sollen, kann auch über die Ausgießöffnung in einen Becher umgeleert werden. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass beim Aufziehen der Spritzen die Flasche nicht umgedreht werden darf – das ist auch gar nicht nötig, denn ESD wurde so konzipiert, dass Sie die Flasche auf den Tisch stellen, die Spritze aufsetzen und die gewünschte Menge entnehmen.


Zusammengefasst bietet Ihnen das ESD-Entnahmesystem folgende Vorteile:

- Zeitersparnis durch schnelle, direkte Entnahme
- Hygiene x 3:
 1. kein Verschütten der Lösung, da das Umgießen entfällt
 2. das Kontaminationsrisiko sinkt, da weniger Arbeitsschritte erforderlich sind
 3. die Gefahr der Verunreinigung der Lösung durch Zurückgießen überschüssiger Flüssigkeit aus dem Becher entfällt
- Materialeinsparung, da genau die gewünschte Menge entnommen werden kann und der Becher eingespart wird, sowie die nahezu rückstandsfreie Entnahme aus der Flasche auch weiterhin möglich ist.

Last but not least – ESD ist auch für Systeme zum permanenten Spülen geeignet.


WIE KOMMEN SIE MIT DEM ESD-ENTNAHMESYSTEM GEGENÜBER IHRER GEWOHNTE METHODE ZURECHT?

- 41 % wesentlich besser
- 40 % besser
- 19 % gleich gut
- 0 % nicht so gut

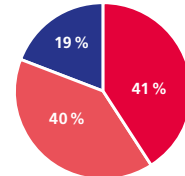


WIE BEWERTEN SIE DIE HANDHABUNG DES ESD-ENTNAHMESYSTEMS?

- 24 % einfach
- 22 % sicher
- 17 % schnell
- 16 % hygienisch
- 11 % sparsam
- 10 % professionell

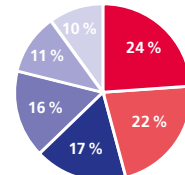


JEDER TROPFEN NAOCL HINTERLÄSST HELLE FLECKEN AUF DER KLEIDUNG. WIRD DIESE „FLECKENGEFAHR“ DURCH DAS ESD-ENTNAHMESYSTEM REDUZIERT?

- 74 % ja
- 26 % nein

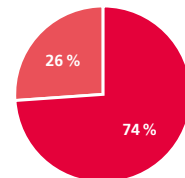

IHRE ABSCHLUSSBEWERTUNG: WIE BEWERTEN SIE DAS NEUE ESD-ENTNAHMESYSTEM VON LEGE ARTIS?

- 47 % sehr gut
- 46 % gut
- 7 % befriedigend
- 0 % ausreichend
- 0 % mangelhaft
- 0 % ungenügend

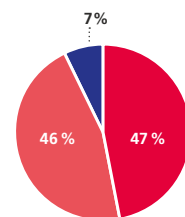

WÜRDEN SIE DAS ESD-ENTNAHMESYSTEM IHREN KOLLEGEN/INNEN WEITEREMPFEHLEN?

- 86 % ja
- 9 % vielleicht
- 5 % nein

